



Manual de Coleta

PASSO 7

Coloque o envelope de retorno (contendo os 4 swabs) dentro do envelope de envio, juntamente com o Termo de Consentimento e Informações do Paciente assinados. Feche com o lacre de segurança e preencha as informações do remetente (nome e endereço)

PASSO 8

Entre em contato com a Haoma by Dnaclinic/ IBGMB através do WhatsApp 11 92207-4262 ou através do email diretoria@dnaclinic.com.br para solicitar o código de retorno para envio da amostra via correios.

PASSO 9

Dentro do kit você encontrará uma declaração de conteúdo que deve ser assinada e fixada do lado de fora do envelope de retorno

Manual de Coleta

PASSO 1



Antes de iniciar a coleta de seu DNA de células bucais, é necessário estar, pelo menos, 1 hora em jejum (sem comer, beber, fumar ou limpar sua boca). Lave bem as mãos antes de abrir o saquinho com o swab coletor. Atente-se ao local de abertura para abrir o saquinho corretamente.

PASSO 2



Remova os três swabs coletores do saquinho plástico com cuidado. **Não toque** na “ponta do algodão” do swab

PASSO 3



Para coletar sua amostra de células bucais, introduza o primeiro swab em sua boca e esfregue-o (com a “ponta do algodão”) em sua mucosa da bochecha em movimentos circulares por 30 segundos. Repita o processo novamente do outro lado da sua boca. **IMPORTANTE:** Faça-o com firmeza. Repita o mesmo procedimento com os dois outros swabs.

PASSO 4



Introduza os swabs coletores no envelope de retorno, inserindo a “ponta do algodão” primeiro.

PASSO 5



Feche o envelope de retorno com a fita autoadesiva e preencha suas informações no verso do mesmo.

PASSO 6

Leia e assine o Termo de Consentimento e preencha as informações do Paciente que se encontram dentro do kit de coleta.

CONTINUA

